

INFORMATION

No. 1503-05

採取容器の変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成27年3月30日(月)提出分より、検査内容(検体採取容器)を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

新		旧	
◇容器番号 01 (癌胎児性フィブロ ネクチン用容器)		◇容器番号 01 (癌胎児性フィブロ ネクチン用容器)	
◇検査項目[コード] ・癌胎児性フィブロ ネクチン[2858]		◇検査項目[コード] ・癌胎児性フィブロ ネクチン[2858]	

尚、採取方法につきましては裏面に掲載致しました。

■変更実施期日

平成27年 3月 30日(月) 提出分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■癌胎児性フィブロネクチン/新専用採取容器による 採取方法

従来容器に比べ、③～⑤の操作が必要となりますのでご注意ください。

